

FICHA TÉCNICA

# GPOLAROL® DPPO

## Descontaminante nebulizado pessoal com solução Gpolarol®

SKU: DPPO100, DPPO200

APENAS PARA USO EM CASO DE QUEIMADURA QUÍMICA



**DPPO 200**  
SPRAY TIPO NÉVOA 200ML  
(Difusor Verde)

**DPPO 100**  
SPRAY TIPO NÉVOA 100ML  
(Difusor Branco)

**DESCRIÇÃO:**

É um dispositivo médico de Classe II, que consiste em um sistema de lavagem de primeiros socorros com solução Gpolarol® em formato de aerossol e ação nebulizada, indicado para uso tópico em casos de acidentes por respingos com agentes químicos de pH ácido e alcalino. **Apresentado em dois formatos de 100 mL e 200 mL com solução Gpolarol®**

**BENEFÍCIOS:**

- Apresentação leve e fácil de manipular.
- Spray nebulizado.

**MODO DE USO:**

- Apenas gire e pressione a tampa do dispositivo, e a solução Gpolarol® será expelida como um spray nebulizado. Aplique diretamente na superfície afetada a uma distância de 10 a 15 cm, esvaziando TODO o conteúdo do recipiente.  
(Consulte o protocolo de uso)
- DPPO100 indicado para áreas afetadas até 3%.
- DPPO200 indicado para áreas afetadas até 9%.

**ARMAZENAMENTO:**

Manter o produto a uma temperatura superior a 2°C e inferior a 50°C.

**CARACTERÍSTICAS**

SKU	Peso Líquido	Peso Bruto	Dimensões	Gás Propulsor	Validade	Uso	Tempo de Lavagem
DPPO100	100 mL 104 g de Solução Gpolarol®	100 mL 0,17Kg	Ø53mm H:180mm	Ar Comprimido	24 meses	Tópico	120 s.
DPPO200	200 mL 208 g de Solução Gpolarol®	200 mL 0,27 Kg	Ø53mm H: 210 mm				240 s.

