# info@anphoterol.com / +569 38788033 / www.anphoterol.com

### FICHA TÉCNICA

# BLUE DOT ANTÍDOTO HF

## Solo usar en caso de quemadura con HF

SKU: GEL HF



Es un dispositivo médico clase III, que consiste en un gel antídoto de uso tópico de gluconato de calcio 2,5%, utilizado como primeros auxilios en tratamiento de quemaduras química ocasionadas por el ácido fluorhídrico (HF).

### **BENEFICIOS**

- Reduce el riesgo de Hipocalcemia.
- Tamaño compacto, lo que permita ser almacenado en botiquines de primeros auxilios.
- · Alivia el dolor y es fácil de aplicar.
- Se puede aplicar inmediatamente tan pronto como se sospeche de la guemadura.
- No es necesario ningún equipo sofisticado





### MODO DE USO:

• Aplicar Anphoterol® de 200 mL en la zona afectada, retirar cuidadosamente la ropa contaminada para no extender la zona de contacto entre el agente y la piel. Utilizando guantes protectores adecuados, aplique el antídoto H-F abundante en el área afectada, masajeando suavemente usando repetidas aplicaciones hasta 15 min después de que el dolor haya disminuido. Cubra el área afecta con un apósito bañado en gel y una venda ligera. Si el dolor reincide en el área quemada reaplique el gel antídoto H-F. Transferir al paciente al hospital.

### **ALMACENAMIENTO:**

 Mantener producto a temperatura superior a 8°C y menor a 30°C.

### **CONTRA-INDICACIONES:**

· En caso de salpicadura en los ojos, NO aplicar Gel.

### CERTIFICACIONES:

- ISO 13.485:2016
- Directiva 93/42/EEC

