

FICHA TÉCNICA

ANPHOTEROL® DCM

Descontaminador nebulizado personal con solución ANPHOTEROL® cutáneo y ocular.

SKU: DCM100, DCM200

SOLO UTILIZAR EN CASO DE QUEMADURA QUÍMICA



DCM 200
SPRAY TIPO NIEBLA 200mL
(Tapa Verde)

DCM 100
SPRAY TIPO NIEBLA 100mL
(Tapa Blanca)

DESCRIPCIÓN:

Es un dispositivo médico clase II, que consiste en un sistema de lavado de primeros auxilios con solución Anphoterol® en formato aerosol y acción nebulizada, indicados para piel y ojos, en caso de accidentes por salpicaduras con agentes químicos ácido-base, oxidantes-reductores y corrosivos-irritantes.

Presentado en dos formatos de 100 mL y 200 mL con solución Anphoterol®.

BENEFICIOS

- No produce daño o traumas en la zona ocular o cutánea.
- Presentación ligera y fácil de manipular.
- Spray nebulizado.

MODO DE USO

Solo se debe girar y presionar la tapa del dispositivo, y la solución Anphoterol®, saldrá expulsada como spray nebulizado. Aplique directamente en la superficie afectada a una distancia de 10 a 15 cm, vaciando **TODO** el contenido del envase. (Ver protocolo de Uso)

- DCM100 indicado para áreas afectadas hasta 3%.
- DCM200 indicado para áreas afectadas hasta 9%.

ALMACENAMIENTO

Mantener producto a temperatura superior a 2°C y menor a 50°C.

CERTIFICACIONES

- N° Inscripción empresa ISP EDM 518/20
- Certificado FCR empresa: CH318 para ISO 13485:2016

CARACTERÍSTICAS

SKU	Peso Neto	Peso Bruto	Dimensiones	Gas Propulsor	Vencimiento	Uso	Tiempo de Lavado
DCM100	100 mL 104 g de Solución Anphoterol®	100 mL 144 g	Ø45mm H: 172mm	Aire comprimido	24 meses	Cutánea y ocular	109 - 65 s.
DCM200	200 mL 204 g de Solución Anphoterol®	200 mL 258 g	Ø53mm H: 186 mm				286 - 171 s.

