

FICHA TÉCNICA

GPOLAROL® DPPO

Descontaminante nebulizado pessoal com solução Gpolarol®

SKU: DPPO100, DPPO200

PARA USO EM CASO DE QUEIMADURA QUÍMICA

DESCRIÇÃO:

É um dispositivo médico, que consiste em um sistema de lavagem de primeiros socorros com solução Gpolarol® em formato de aerossol e ação nebulizada, indicado para uso tópico em casos de acidentes por respingos com agentes químicos como ácidos, bases, substâncias corrosivas, tóxicas e/ou irritantes. **Apresentado em dois formatos de 100 mL e 200 mL, ambos contendo solução Gpolarol®.**

BENEFÍCIOS:

- Apresentação leve e fácil de manipular.
- Spray nebulizado.
- Uso tópico.



DPPO 200
SPRAY TIPO NÉVOA 200ML
(Tampa Verde)

DPPO 100
SPRAY TIPO NÉVOA 100ML
(Tampa Branca)

MODO DE USO:

- Apenas gire e pressione a tampa do dispositivo, e a solução Gpolarol® será expelida como um spray nebulizado. Aplique diretamente na superfície afetada a uma distância de 10 a 15 cm, esvaziando TODO o conteúdo do recipiente.
(Consulte o protocolo de uso)
- DPPO100 indicado para áreas afetadas até 3%.
- DPPO200 indicado para áreas afetadas até 9%.

ARMAZENAMENTO:

Manter o produto a uma temperatura superior a 2°C e inferior a 50°C.

CARACTERÍSTICAS

SKU	Peso Líquido	Peso Bruto	Dimensões	Gás Propulsor	Validade	Uso	Tempo de Lavagem
DPPO100	100 mL 104 g de Solução Gpolarol®	100 mL 144 g	Ø45 mm H: 172 mm	Ar Comprimido	24 meses	Tópico	109 - 65 s
DPPO200	200 mL 204 g de Solução Gpolarol®	200 mL 258 g	Ø53 mm H: 186 mm				286 - 171 s

